



FILLTEC

Ácido Hialurónico Reticulado

 **IMPLANTEC**
WELLNESS

FILLTEC es un gel de hialuronato de sodio para relleno dérmico.

El HA (Ácido Hialurónico) reticulado de alta calidad FILLTEC, forma puentes en la matriz intercelular del tejido y gracias a eso es capaz de resistir la degradación enzimática natural del HA durante más tiempo.

Debido a que el gel FILLTEC se inyecta en estado isotónico e isohidriónico, reduce la posibilidad de contracción o expansión en los días siguientes al tratamiento y hace que el resultado de cada inyección sea más predecible.

Se trata de una formulación monofásica inhomogénea, reticulada con BDDE, el más seguro de los agentes reticulantes disponibles en el mercado, unido de manera covalente e irreversible a la molécula de HA, con un límite de residualidad < 2ppm, reduciendo al máximo su potencial inflamatorio.

FILLTEC se integra suavemente a la piel para conseguir un efecto de relleno físico, ofreciendo una solución estética predecible y armónica.

La reticulación consiste en la unión de cadenas lineales neutras de HA para formar una red tridimensional que proporciona una mayor resistencia a la degradación enzimática natural y, por tanto, una mayor duración.




HA no reticulado


Nuestro cuerpo utiliza enzimas para degradar el HA no reticulado normalmente en 2 - 3 días, y es la razón por la que inyectar HA no reticulado en el cuerpo no proporciona ninguna corrección de las arrugas.



HA reticulado

El agente reticulante se utiliza para formar puentes entre las cadenas de HA, capaces de resistir la degradación enzimática natural del organismo.

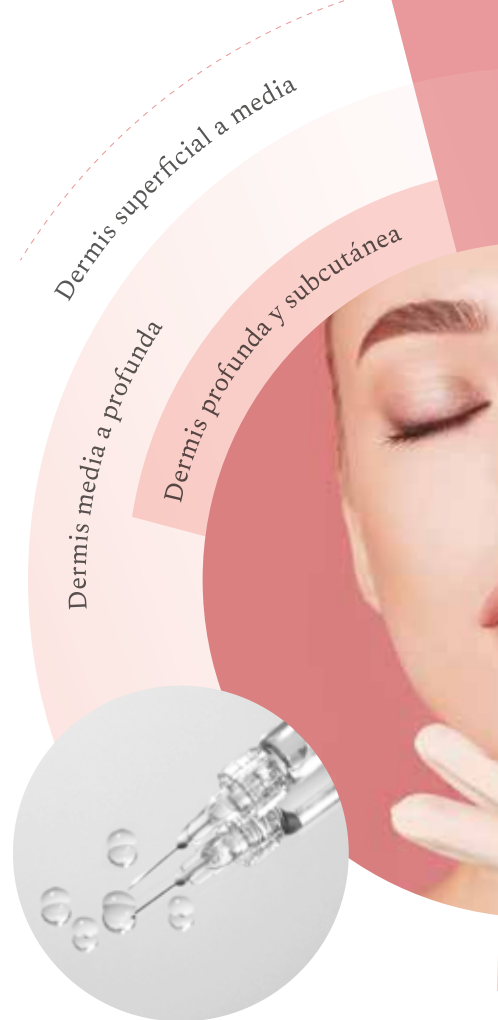

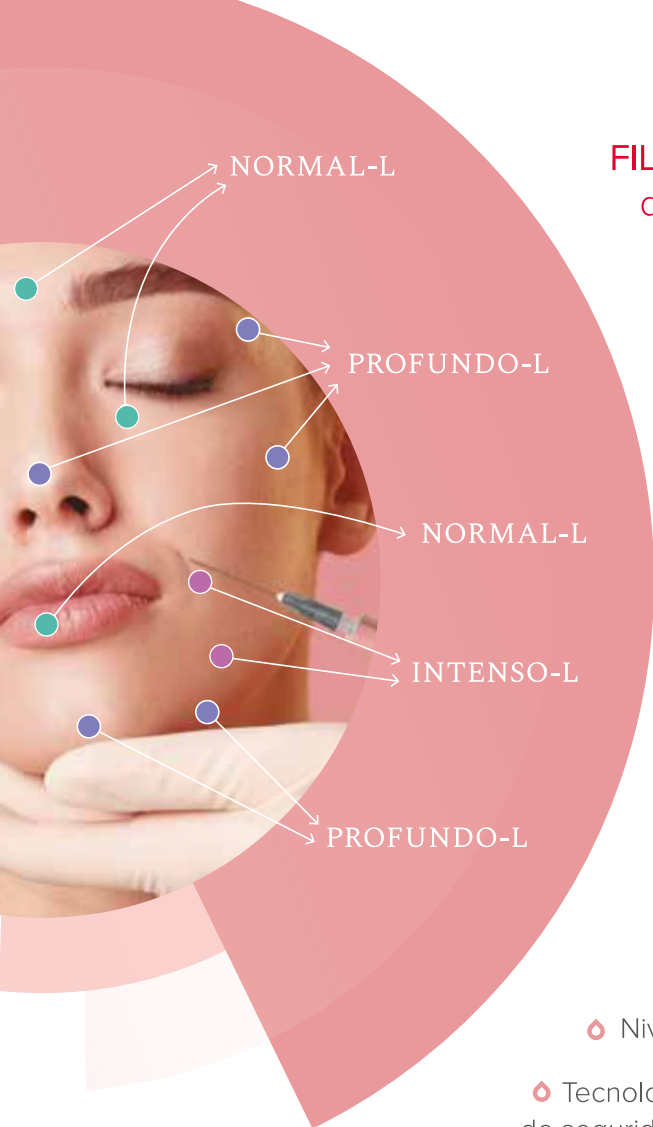

FILLTEC puede emplearse para rellenar depresiones y surcos, mejorar contornos, restaurar volúmenes, rehidratar y rejuvenecer la piel, aumentar su firmeza y la elasticidad, mejorar su aspecto y brillo. Aplicable en la dermis de cara, cuello, escote, labios y manos.

Seguridad y Efectividad

- ◊ Materia prima de HA de muy alta pureza.
- ◊ Fuente de biofermentación no animal.
- ◊ No requiere prueba cutánea previa.
- ◊ Sin riesgo de transmisión de enfermedades animales.
- ◊ Llenado aséptico en área calificada. Producto estéril y apirógeno.
- ◊ Nivel de garantía de esterilidad (SAL) $\leq 10^{-6}$.
- ◊ Tecnología de reticulación patentada con el máximo de seguridad internacional.




**HIDRATA
INTENSAMENTE**

**DISMINUYE
ARRUGAS Y LÍNEAS
DE EXPRESIÓN**

**RECUPERA
EL VOLUMEN
PERDIDO**

FILLTEC

Hialuronato de sodio para relleno dérmico

 NORMAL-L	 INTENSO-L	 PROFUNDO-L
Dermis superficial a media	Dermis media a profunda	Dermis profunda y subcutánea
Imperfecciones superficiales en dermis y comisuras	Líneas profundas y más pronunciadas	Áreas de gran volumen mediante contorneado y modelado
HA reticulado 10mg/ml Lidocaína 0.3%	HA reticulado 20mg/ml Lidocaína 0.3%	HA reticulado 30mg/ml Lidocaína 0.3%
G´ 5HZ (Pa) 250	G´ 5HZ (Pa) 350	G´ 5HZ (Pa) 650
Cohesividad Mediana	Cohesividad Alta	Cohesividad Muy alta
Absorción máxima de agua ~300		

FILLTEC se comercializa en diferentes concentraciones de ácido hialurónico, con lidocaína 0,3 %, adaptándose así a las necesidades de cada paciente.

Presentación: 2 unidades x 1ml

Producto autorizado por la ANMAT 1623-207



+5411 4302-7111 • Perdriel 1624 • C1279AHN • CABA • Argentina
wellness@implantecinsumos.com • implantecinsumos.com

Sistema de Gestión de calidad
certificado ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016
por TÜV NORD